

## **7.4. Программы терапии P1-P8 «Vacustyler».**

Программа P1. Целлюлит и слабая соединительная ткань, хорошее общее состояние. (30 мин.)

Программа P 1	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	10	40
Фаза 2	18	08	10	12	44
Фаза 3	21	08	12	12	44
Фаза 4	09	09	03	12	44

Программа P2. Целлюлит и слабая соединительная ткань, с варикозным расширением вен и / или опухшие ноги. (30 мин.)

Программа P 2	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	08	36
Фаза 2	18	08	08	09	38
Фаза 3	21	09	14	09	38
Фаза 4	09	09	03	10	40

Программа P3. Укрепление соединительной ткани для молодых людей, хорошее общее состояние. (30 мин.)

Программа P 3	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	03	10	40
Фаза 2	10	07	05	15	50
Фаза 3	10	07	17	18	60
Фаза 4	15	07	05	15	50

Программа P4. Стимулирование кровообращения при хорошем общем состоянии и гипертонии; Профилактика / тренировка сосудов (30 мин.)

Программа P 4	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	07	05	05	10	40
Фаза 2	09	06	10	12	44
Фаза 3	12	07	10	15	50
Фаза 4	09	05	05	12	44

# VACUSTYLER

Официальный представитель  
Weyergans High Care AG  
в России ИП Аракелян С.М.  
тел. +7(985) 966 9900  
E-mail: info@asmedtrade.com

Аппарат интервальной  
вакуумной терапии



Gut Boisdorf  
D-52355 Duren Germany

Программа P5. Стимулирование кровообращения для пожилых людей / тренировка сосудов (30 мин.)

Программа P 5	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	06	07	05	07	34
Фаза 2	07	07	05	10	40
Фаза 3	08	07	17	12	44
Фаза 4	20	08	03	09	38

Программа P6. Улучшение перфузии, вызванное PAOD (заболевание периферических артериальной окклюзии) / тренировка сосудистой (40 мин.)

Программа P 6	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	07	34
Фаза 2	09	07	10	12	44
Фаза 3	09	09	10	15	50
Фаза 4	07	09	15	15	50

Программа P7. Диабетическая микроангиопатия / тренировка сосудов (40 мин.)

Программа P 7	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	07	07	07	09	38
Фаза 2	10	08	13	12	44
Фаза 3	18	09	15	12	44
Фаза 4	07	07	05	15	50

Программа P8. Язва, посттромбофлебитический синдром (40 мин.)

Программа P 8	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	05	07	05	09	38
Фаза 2	17	08	15	12	44
Фаза 3	21	08	10	12	44
Фаза 4	08	08	10	14	48

\* Данные значения (mbar) являются приблизительными и на каждом шаге могут колебаться на «±» 5 mbar. Кроме того данные значения могут понижаться в зависимости от изношенности шторки диафрагмы.