

7.4. Программы терапии P1-P8 «VACUMED».

Программа P 1. Показана при незначительных косметических дефектах кожи.

Программа P1	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	10	40
Фаза 2	18	08	10	12	44
Фаза 3	21	08	12	12	44
Фаза 4	09	09	03	12	44

Программа P 2. Показана хроническая венозная недостаточность, слоновости, при выраженных косметических дефектах

Программа P2	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	08	36
Фаза 2	18	08	08	09	38
Фаза 3	21	09	14	09	38
Фаза 4	09	09	03	10	40

Программа P 3. Показана для тренировки сосудистого тонуса у практически здоровых пациентов.

Программа P3	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	03	10	40
Фаза 2	10	07	05	15	50
Фаза 3	10	07	17	20	60
Фаза 4	15	07	05	15	50

Программа P 4. Нарушения микроциркуляции нижних конечностей, гипертоническая болезнь I стадии.

Программа P4	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	07	05	05	10	40
Фаза 2	09	06	10	12	44
Фаза 3	12	07	10	15	50
Фаза 4	09	05	05	12	44

Программа Р 5. Профилактика тромбозов и сосудистых заболеваний.

Программа Р5	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	06	07	05	07	34
Фаза 2	07	07	05	10	40
Фаза 3	08	07	17	12	44
Фаза 4	20	08	03	09	38

Программа Р6. Облитерирующий эндартериит, окклюзия сосудов нижних конечностей.

Программа Р6	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	09	07	05	07	34
Фаза 2	09	07	10	12	44
Фаза 3	09	09	10	15	50
Фаза 4	07	09	15	15	50

Программа Р 7. Диабетическая микроангиопатия.

Программа Р7	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	07	07	07	09	38
Фаза 2	10	08	13	12	44
Фаза 3	18	09	15	12	44
Фаза 4	07	07	05	15	50

Программа Р8. Трофические язвы и дистрофические изменения кожи нижних конечностей.

Программа Р8	Длительность фазы			Мощность турбины.	
	отрицательного давления (сек.)	паузы (сек.)	общая (мин.)	шаг	мбар*
Фаза 1	05	07	05	09	38
Фаза 2	17	08	15	12	44
Фаза 3	21	08	10	12	44
Фаза 4	08	08	10	14	48

* Данные значения (mbar) являются приблизительными и на каждом шаге могут колебаться на «±» 5 mbar. Кроме того данные значения могут понижаться в зависимости от изношенности шторки диафрагмы.