

ИП АРАКЕЛЯН С.М.
Эксклюзивный дистрибьютор в России
Weyergans High Care AG, Germany
ИНН 772135893564
109125 г. Москва,
Волжский бульвар, 13-1-155
тел. +7(985) 966-99-00
E-mail: info@asmedtrade.com
www.asmedtrade.com



Entrepreneur Svetlana Arakelyan
Exclusive representative in Russia
Weyergans High Care AG, Germany
INT 772135893564
109125 Moscow,
Volzhskiy bvd, 13-1-155
Tel. +7(985) 966-99-00
E-mail: info@asmedtrade.com
www.asmedtrade.com

**Требования к помещению
для проведения монтажных работ и эксплуатации
аппарата интервальной вакуумной терапии VACUMED SL.**

- Минимальные размеры помещения (Д x Ш): 3,5 x 2,5 метра.
следует из габаритов смонтированного аппарата с панелью управления, которая равна (Д x Ш): 2 200(3 200) x 970 мм
- Сетевое напряжение: 230 В / 50-60 Гц
- Потребляемый ток: 6 А.
- Электрическая розетка с заземлением для подключения аппарата должна располагаться на той стене, вдоль которой должен быть установлен аппарат.
- Помещение должно обеспечиваться естественным воздухообменом или иметь систему принудительной вентиляции.
- Минимальная ширина проема дверей: 900 мм.


ТАРА

Масса брутто:

290 - 295 кг

Габариты тары (Д x Ш x В)

235 x 93 x 134 см.

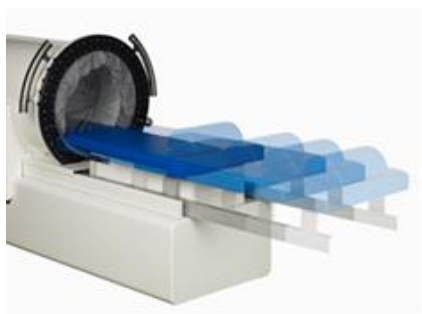

Внимание!

Рекомендация:

Если параметры электрической сети вашего помещения не являются стабильными или возникают проблемы с электропитанием, непосредственно на вашем участке электросети, рекомендуем подключить аппарат через стабилизатор напряжения мощностью не менее 1500 Вт.